

2009年10月5日

お客様各位

東京都港区赤坂2丁目2番12号
ソーリン株式会社
品質保証部
マーケティング部
TEL.03-3560-8250

コープ レボリューションポンプ 使用上の注意に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社が販売しております単回使用遠心ポンプ「コープ レボリューションポンプ」のプラスチックトレイにつきまして、弊社海外製造元における調査結果から、トレイに亀裂が起こりうる脆弱性がある旨の連絡がございました。トレイに亀裂が発生した場合には、製品の滅菌性が保たれなくなることから、ご使用時の注意としてご報告を申し上げます。当該事象の対象ロット番号を以下に記しております。



対象ロット番号： 0905220163, 0905220166, 0906240182, 0906240185

当該製品の添付文書にも使用上の注意といたしまして、ご使用前に滅菌包装に異常のないことを確認頂くよう記しておりますが、お手元に当該対象ロット製品がございましたら、今一度、ご使用前に目視検査を注意深く行なって頂きますようお願い申し上げます。トレイの亀裂は、トレイ隅の丸角部分に見られ、目視にて容易に検出できます。添付の写真をご参照頂ければ幸いです。トレイに亀裂が見られた場合には、その製品はご使用なさらずに、速やかに弊社営業員にご連絡ください。

この度はご心配とお手数をおかけすることになり、心よりお詫び申し上げます。弊社では一層の品質改善、安全確保の努力を行うとともに十分な情報提供とサービスの向上を心がけて参りますので、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

別添試料:トレイの亀裂が生じやすい部分について

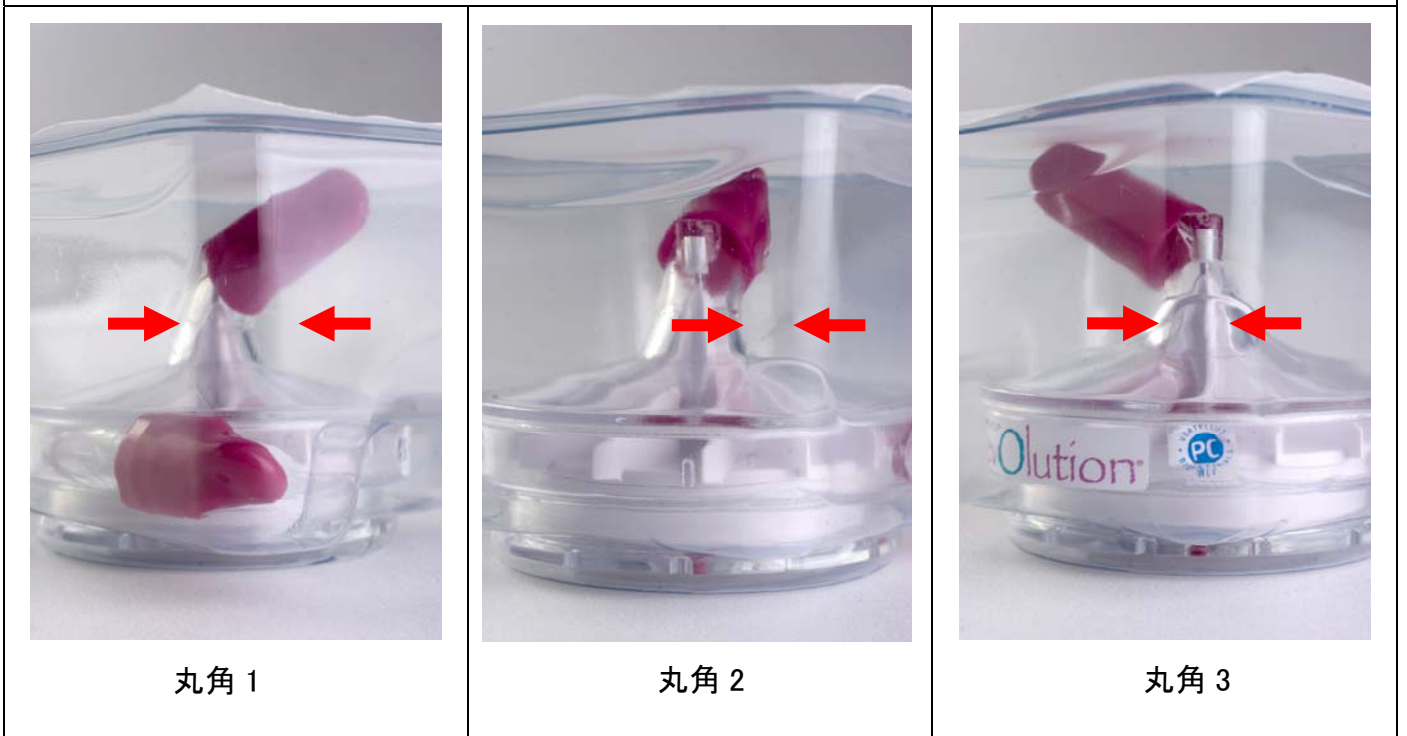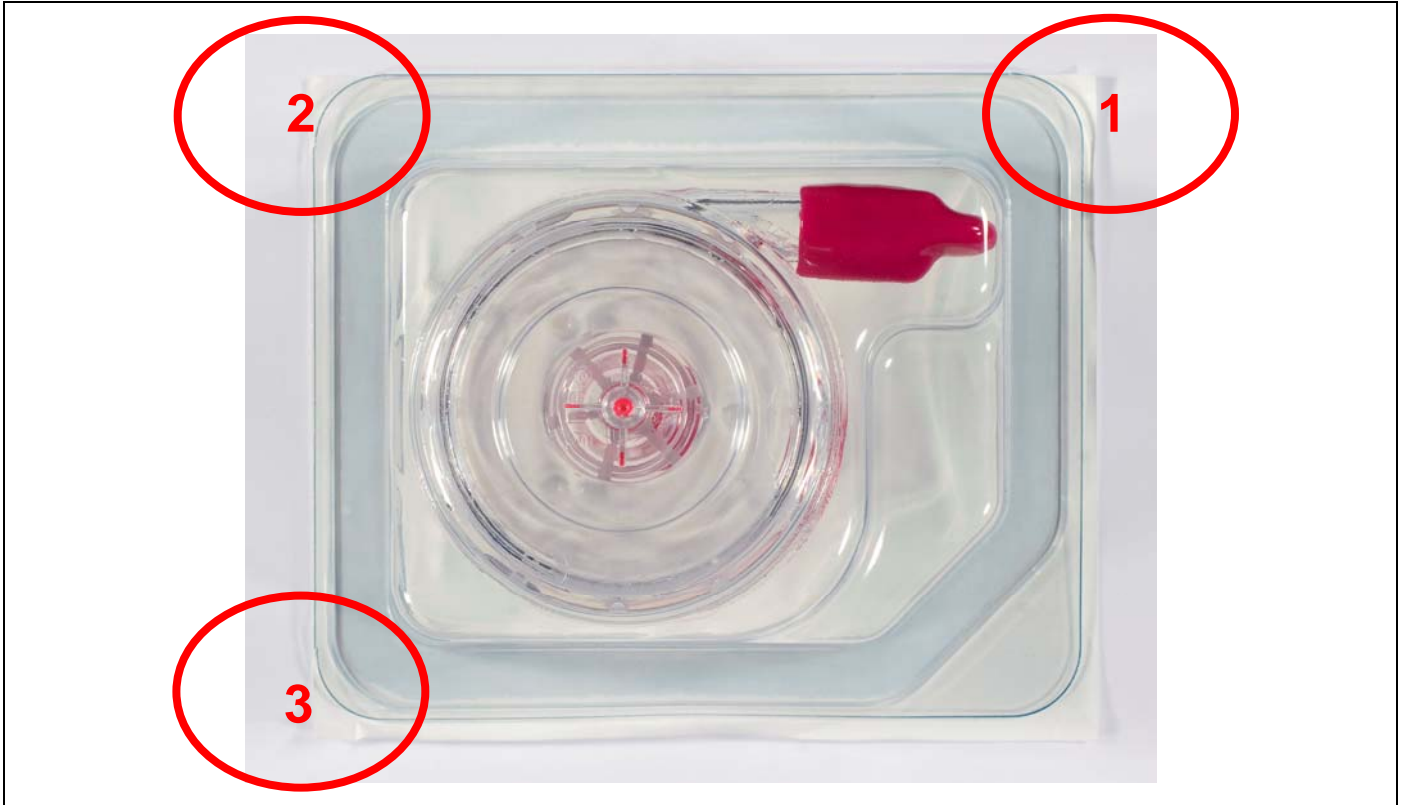

注: 上図はサンプルであり、トレイの亀裂はありません。

ソーリン株式会社